

Manejo de un derrame de quimioterapia accidental


DERRAMES ACCIDENTALES O FUGAS EN LOS TUBOS:

Siga las instrucciones a continuación y comuníquese con la Línea de soporte clínico de InfuSystem: 1-800-315-3287.

IMPORTANTE:

- Use siempre dos pares de guantes cuando tenga que limpiar un derrame.
- Notifique a su proveedor de atención de la salud que se produjo un derrame.
- Limpie el derrame de inmediato.

1. Detenga la infusión.
2. Cierre la abrazadera del tubo de la bomba.

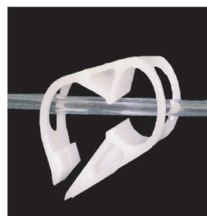

3. Limpie el derrame de medicamento peligroso de inmediato. Utilice guantes protectores y seque el derrame con toallas de papel. Limpie el área tres veces con agua y jabón.
4. Deseche todos los materiales utilizados para la limpieza en la bolsa plástica Ziplock para quimioterapia.
5. Quítese las prendas manchadas con medicamento de inmediato.
6. Cuando deba limpiar sábanas o prendas de vestir manchadas con medicamento, no toque el área manchada con las manos sin protección. Coloque las sábanas o prendas de vestir en la lavadora de inmediato. Lave estos elementos con agua caliente y separados de otras prendas. Si no los puede lavar de inmediato, colóquelos en una bolsa de plástico hermética hasta que pueda lavarlos.

SI EL MEDICAMENTO ENTRÓ EN CONTACTO CON SU PIEL O SUS OJOS:

1. Los medicamentos para quimioterapia derramados sobre la piel pueden causar irritación. Lave el área minuciosamente con agua y jabón, y luego séquela. Observe la piel durante los próximos 7 días. Si aparece enrojecimiento o irritación, comuníquese con su médico.
2. Si el medicamento salpica sus ojos, enjuáguese con agua del grifo durante 15 minutos como mínimo. Luego, comuníquese con su proveedor de atención de la salud.

CÓMO DESECHAR LOS ELEMENTOS EXPUESTOS A LA QUIMIOTERAPIA:

1. Coloque todos los suministros que hayan entrado en contacto directo con la quimioterapia en una bolsa marcada especialmente como para “Residuos de quimioterapia” o “Residuos peligrosos”.
2. Selle la bolsa de residuos y deséchela según las instrucciones de su centro de infusión.

La Línea de ayuda de enfermería de InfuSystem está disponible para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llame al 1-800-315-3287 para obtener ayuda con la bomba de inmediato.

